

PHILIPS  
RESPIRONICS

*DreamWisp*



# Conforto a cada virada

© 2019 Koninklijke Philips N.V. Todos os direitos reservados. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

AP 04/23/19 PN2500287  
1010 Murry Ridge Lane, Murrysville, PA 15668 800  
345 6443 • 724 387 4000

Registro ANVISA 10216710370

[www.philips.com/respironics](http://www.philips.com/respironics)

# Conforto a cada virada

Apresentando a máscara de contato mínimo da Philips Respironics, a marca N° 1 de terapia\* do sono segundo médicos especialistas em sono nos EUA. A DreamWisp ajuda seus pacientes a continuarem dormindo confortavelmente a cada virada porque combina a liberdade proporcionada pelo revolucionário tubo DreamWear com design no topo da cabeça à vedação da almofada Wisp de contato nasal mínimo.

Agora, você pode oferecer a seus pacientes uma solução inovadora, que lhes permite dormir como quiserem, sem ter sobre o rosto um tubo que os limite. O design da DreamWisp direciona o fluxo de ar através da armação para que os pacientes possam dormir confortavelmente, enquanto a conexão do tubo localizada no topo da cabeça permite que os pacientes durmam em qualquer posição desejada — de bruços, de lado ou de costas.

## Vantagens da DreamWisp

- O tubo no topo da cabeça permite que os pacientes durmam em qualquer posição desejada
- O fluxo de ar através da armação da máscara permite que os pacientes durmam confortavelmente
- A almofada de contato nasal mínimo proporciona conforto e vedação
- A estrutura de quatro pontos na cabeça proporciona estabilidade



# Philips DreamWisp

## Armação de silicone

Material leve e flexível concebido para oferecer conforto

## Fluxo de ar dentro da armação

O design exclusivo permite que o ar flua através da armação, ajudando os pacientes a dormirem confortavelmente em qualquer posição

## A estrutura de quatro pontos na cabeça

Proporciona ajuste e estabilidades excepcionais

## Presilhas magnéticas

Para fácil montagem e retirada

## A conexão do tubo no topo da cabeça


Proporciona liberdade de movimentos durante a noite inteira

## Campo de visão aberto

Use óculos, leia e assista à TV

## Design de almofada com contato nasal mínimo

Para conforto e ajuste excepcionais

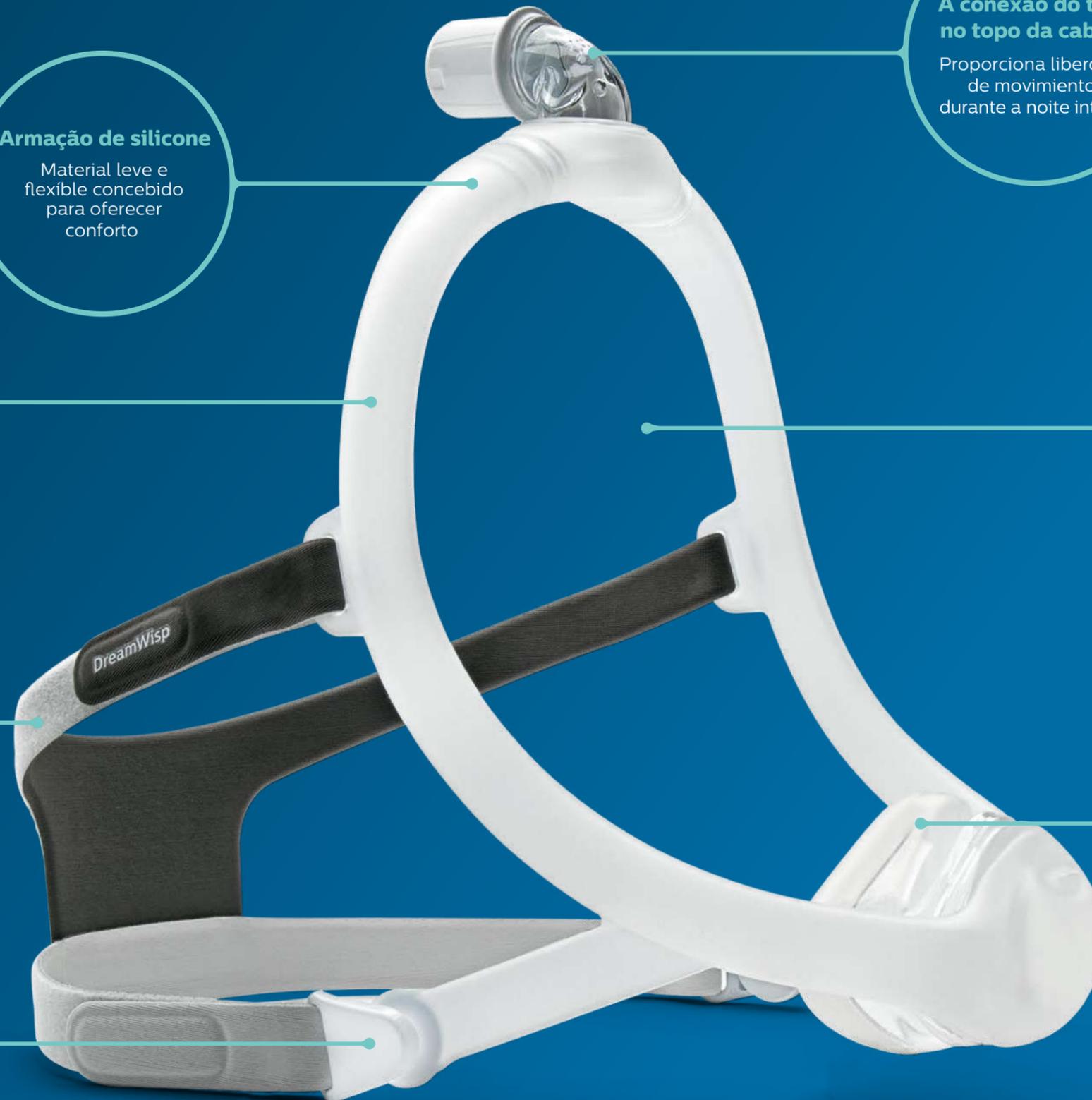



# Ouçá o que os médicos estão dizendo sobre a **DreamWisp**

97% dos médicos afirmaram que recomendariam a DreamWisp a outro médico, enquanto 73% prefeririam recomendar a AirFit N20 da ResMed\*

97% dos médicos afirmaram que recomendariam a DreamWisp a um paciente, enquanto 73% prefeririam recomendar a AirFit N20 da ResMed\*

Os médicos estão mais satisfeitos com a vedação da DreamWisp do que com a vedação da AirFit N20 da ResMed\*

87% dos médicos disseram que a máscara DreamWisp se ajusta melhor do que a AirFit N20 da ResMed\*

Os médicos ficaram mais satisfeitos a identificar o tamanho correto no caso da DreamWisp do que no caso da AirFit N20 da ResMed\*

\* Estudo sobre a facilidade de uso para médicos, abril de 2018, n = 30; as máscaras comparadas incluíram a Airfit N20 da ResMed e a DreamWisp da PRi

# Guia de ajuste da DreamWisp para pacientes

Siga as instruções para começar a ajustar a máscara DreamWisp



1 Seleccione a almofada que melhor se ajusta à largura do seu nariz sem bloquear suas narinas. A parte superior da almofada pode se acomodar entre a ponte e a ponta do seu nariz. Existem cinco tamanhos de almofadas disponíveis: mini, pequeno, médio, grande, extragrande.



2 Solte uma ou ambas as presilhas magnéticas do encaixe da presilha magnética.



3 Coloque a estrutura sobre o topo da sua cabeça.




4 Posicione a almofada sobre o seu nariz.



5 Prenda as presilhas magnéticas nos encaixes das presilhas magnéticas.



6 Para ajustar a estrutura à cabeça, desprenda as abas de velcro na parte inferior da estrutura do fixador de tecido. Ajuste por igual o comprimento das tiras. Pressione as abas de velcro contra o tecido para reafixá-las. Repita essa etapa com as tiras da parte superior.

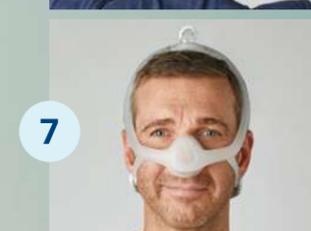

7 Posicione a máscara até que se ajuste confortavelmente. Depois de colocada, a conexão deve ficar posicionada no topo da cabeça. A almofada deve estar confortavelmente acomodada ao seu rosto, sem bloquear suas narinas.

Observação: Leia as instruções de uso para mais informações de ajuste.

# Informações sobre pedidos

## Máscara nasal Philips DreamWisp

## Número da peça

DreamWisp com estrutura de cabeça e almofadas pequena, média e grande 1137916

DreamWisp com estrutura de cabeça e almofada tamanho médio 1137934

## Saiba mais

Para obter mais informações, ligue para:  
**0800 707 6767** ou acesse o site  
[www.philips.com.br/apneiaosono](http://www.philips.com.br/apneiaosono)

